

検温器非接触

「K 3 自動デジタル赤外線検温器」

入り口からの感染対策
据置型非接触温度計



- ①高感度センサーによる安定動作。
- ②高解像度な大型ディスプレイ。
- ③37.2℃以上の場合にはアラーム音とランプで警告。
- ④自動スリープ/ウェイクアップで省電力。
- ⑤幅広い対応環境温度。
- ⑥据置き/壁掛け/三脚による設置が可能。
- ⑦軽量で両面テープでも手軽に設置が可能。
- ⑧僅か0.5秒の高速計測/±0.2℃の高精度計測。

(税込特価) 9,900円

(リチウムイオン電池・三脚スタンド別売、送料別)

セルフ温度チェックで
入口からの
感染対策



37.2℃以上なら
アラームでお知らせ



壁に設置※




三脚で設置※

※ 両面テープは向欄物として付属します。三脚は付属しません。





赤外線センサーから5~10cm離して額か手を近づけてください。異常判定(37.2℃以上)の場合は警告灯とアラートでお知らせします。据置き、壁掛けは、もちろん、三脚を使って固定することもできます。

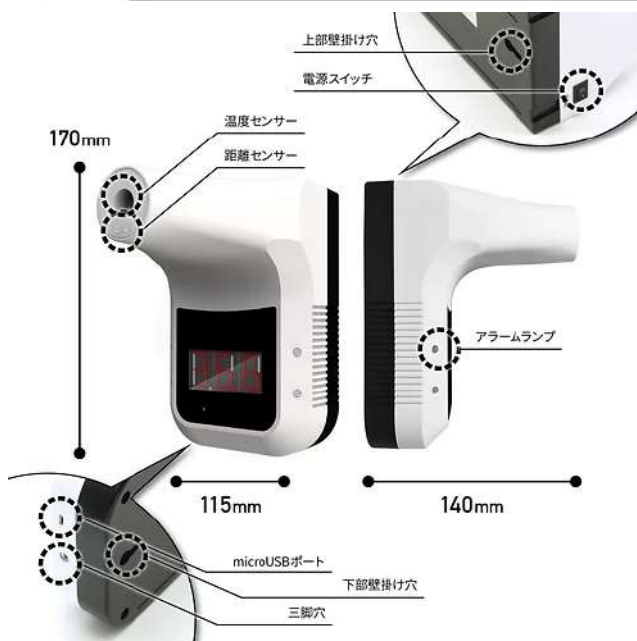

製品仕様

計測精度	±0.2℃ (計測範囲: 34℃~45℃)
計測所要時間	0.5秒
計測距離	5cm~10cm
電源	microUSB 常時給電/バッテリー (Li-ion)
バッテリー駆動時間	24時間 (待機時間: 約7日)
バッテリー充電時間	5時間
設置方法	壁掛け (2支点) / 両面テープ固定 / 三脚*2
使用可能環境温度	10℃~40℃ (推奨: 15℃~35℃)
入力	DC 5V
サイズ	縦170 × 幅115 × 奥行140 (mm)
重量	350g
生産国	中国

同梱物

- ・据置型非接触温度計 K3 (本体)
- ・microUSB給電ケーブル (170cm)
- ・ホネジ (x2)
- ・カーンPCプラグ (x2)
- ・両面テープ (x2)



【注意事項】

本製品は薬事認証を取得した医療機器ではありません。本製品で測定されるものは体表温であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なります。また計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。本製品による測定でエラーが出た場合、体温計での再検温をお願いします。

【設置時の注意】

- ・10℃以上の場所で30分以上置いてからご使用ください。
- ・本装置の設置の際、空調機器から3m以上離して設置してください。
- ・熱源の近くで使用すると、誤って測定する原因となります。

【デジタル表示部に「EL」または「Er2」と表示された場合】

周囲温度が10℃未満のため測定できない状態です。
電源を切り、室内を暖めてから電源を入れ直してください。

お問い合わせは

ENDRESS 日本エンドレス株式会社

【本社】 〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-7-7 エンドレスビル

TEL 03-5383-6777

FAX 03-5997-6800 E-mail info@endress.co.jp

【仙台営業所】 〒981-3201 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘2-15-11

TEL 022-371-8887 FAX 022-371-8886

URL <http://www.endress.co.jp>

商品・当社へのお問い合わせはこちら⇒⇒⇒⇒

